


medbar®

Arter Kanül

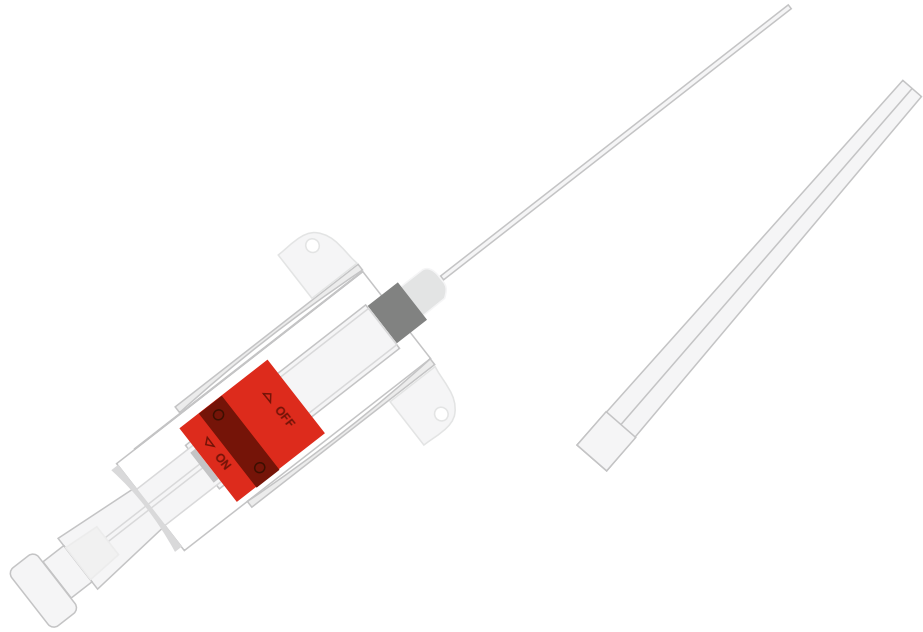

REF 30401

CE 1014



STERILE EO

Arter Kanül

Arter Kanül arterial basınç izleme ve seri arter kan gazı miktarları için kullanılabilir.

Kalite

- * ISO 13485:2012 kalite yönetim standardı koşullarında üretilmiştir.
- * CE sertifikasına sahiptir.

Bio-Uyumluluk


- * Etilen oksit ile steril edilmiştir.
- * Latex içermez.

Uyarılar

- * Kullanım esnasında iğnenin bükülmediğinden emin olun.
- * Kısmen veya tamamen geri çekilmiş olan iğneyi kanül içine tekrar takmaya çalışmayın. Arter girişinin başarısız olduğu durumlarda, hem iğne hem de kanülü kontrollü bir şekilde tıbbi atık ünitesine attığınızdan emin olun.
- * Kontamine iğnenin batması veya mukoz membran yoluyla kan bulaşması durumunda; ciddi bulaşıcı hastalıklara maruz kalınabilir.
- * Ürünün yeniden kullanılması enfeksiyon ya da diğer hastalık veya yaralanmalara neden olabilir.

Raf Ömrü


- * 5 yıl.

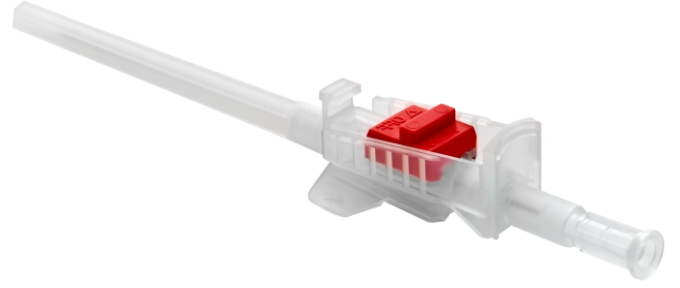

Anahtar ileri doğru itildiğinde sıvı yolu kapatılır.
Hafif bir karşı kuvvet hissedilir.
Anahtar geriye doğru çekildiğinde sıvı yolu açılır.

Kanül, infüzyon veya aspirasyon amacıyla kullanılmadığı zamanlarda akış kontrol aparatı kapatılarak bağlantı göbeğine uygun bir hidrofobik kapak takılmalıdır.

Arter kanül için önerilen enjeksiyon süreleri ile ilgili olarak hastane/kurum protokol ve prosedürlerine uyulması gerekmektedir.

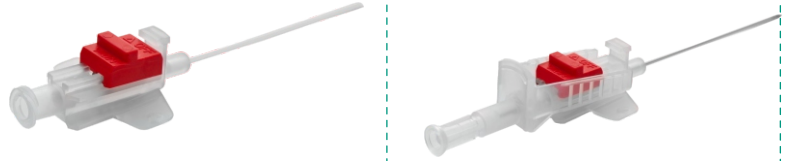

REF NO	ÜRÜN ADI	ÖZELLİKLER	STERİLİZASYON	AMBALAJ
30401	Arter Kanül	<ul style="list-style-type: none"> • İğne ucu atravmatiktir, işlem sırasında hastaya verdiği rahatsızlık minimum seviyededir. • 20 G - 1,10 mm x 45 mm 49 ml/dakika. • Kanül teflondan üretilmiştir. • Yumuşak kanatları sayesinde kolayca sabitlenebilir. • Açma kapama düğmesi sayesinde hava embolisi, kanın geri dönüşümü ve kanla bulaşma kolayca önlenir. • Akım kesme özelliğine sahiptir, mekanizma tek elle kullanılabilir. 	ETO	50 adet / iç kutu 500 adet / koli Koli ebat: 28*64*23,5 cm Koli ağırlık: 4,613 kg